

INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES CON ANILLO DE SEGURIDAD

Inmovilizador de Extremidades con Anillo de Seguridad se emplea para la sujeción mecánica de las extremidades del paciente (muñecas y/o tobillos) que requiera una sujeción firme y segura, evitando movimientos bruscos.

Ventajas:

- ✓ **Suavidad y comodidad** gracias al almohadillado de mayor grosor
- ✓ Elevada **resistencia**, permitiendo la circulación
- ✓ Transpirable, **evita irritaciones en la piel**, el recalentamiento, la humedad y la maceración

Material:


- Almohadilla rellena de espuma de poliuretano y banda de tela no tejida de poliéster
- Anillo de seguridad de polipropileno
- Condición Biológica: No Estéril e Hipoalergénico



Características:

- Inmovilizador de extremidades para uso en cama o silla del paciente, en donde se requiera una sujeción firme y segura
- Debe tener una almohadilla acolchada para brindar suavidad y comodidad al paciente
- Con una cinta de sujeción y anillo de seguridad
- Diseño anatómico, adaptable para muñeca y tobillo
- Permita la circulación
- Evite irritaciones y laceraciones en la piel del paciente
- Sistema de cierre tipo velcro, ajustable a la extremidad del paciente sin lesionarlo
- Transpirable, evitando el recalentamiento, la humedad y la maceración

Modo de Empleo:

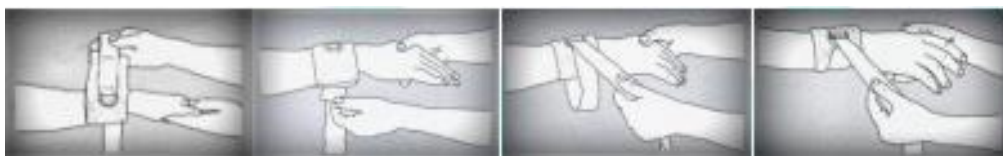

- Desplegar el inmovilizador y colocarlo alrededor de la muñeca o tobillo
- Ajustar el inmovilizador mediante el sistema velcro al diámetro deseado
- Pasar la cinta de sujeción a través del anillo de seguridad
- Asegurar la cinta, fijarla y anudarla a la estructura, preferiblemente metálica, de la cama o silla, de forma que el inmovilizador quede tensado.

Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
1090100	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES CON ANILLO DE SEGURIDAD Y CINTA DE SUJECIÓN DE 168 CM	PAR