

Glowet Dispaclohr 2%

MANOPLA CON CLORHEXIDINA AL 2% PARA BAÑO DE PACIENTE

Manopla de un solo uso con solución acuosa de Clorhexidina al 2 % para el lavado antiséptico de la piel sana. Recomendada para el baño pre-operatorio y la higiene de pacientes encamados o con movilidad reducida

Ventajas:

- ✓ Paquete con **8 manoplas impregnadas con Clorhexidina al 2%** para baño de paciente
- ✓ **NO NECESITA AGUA** evitando derramamientos inesperados sobre la cama o colchón
- ✓ No hace espuma por lo que **NO NECESITA ENJUAGUE**
- ✓ **NO NECESITA SECADO** evitando el uso de toallas
- ✓ **INCOLORO**

Empaque:

- Empaque de fácil apertura conteniendo 8 Manoplas con Clorhexidina al 2%

Material:

- Manopla: 60% poliéster – 40% Viscosa (24 cm x 17 cm +/- 5%)
- Antiséptico: Solución acuosa de Digluconato de Clorhexidina al 2%



Código	Descripción del Dispositivo	Presentación
0040011	MANOPLA CON CLORHEXIDINA AL 2% PARA BAÑO DE PACIENTE	Paquete x 8 Manoplas

Modo de Empleo:

- Frotar suavemente sobre la piel sana, limpia y seca. Humectar uniformemente la superficie de la piel a tratar. Dejar actuar al menos 1 minuto sin forzar el secado. No enjuagar.
- Desechar cada manopla después de su uso

Video del Modo de Empleo: